


BASIC GUIDE




三層築盛	3
二層築盛・オパール築盛	4
Super Opaque・Opaque	5
Margin Porcelain	6
Cervical Technique	7
Internal Accent	8
Opal Accent	9
White Accent	10
Orange Accent	11
GUM	12
Supplement	13
アクセント陶材の使用方法	14
特殊陶材・ステインの使用方法	15




前歯部断面図

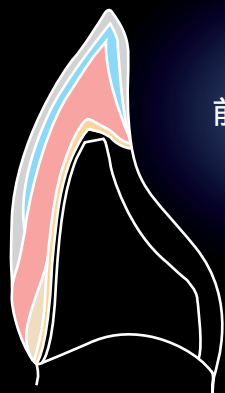


オペーク

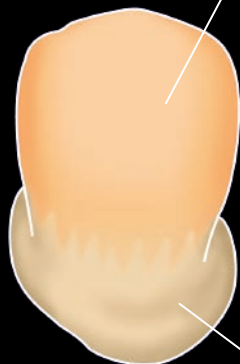

オペークデンティン

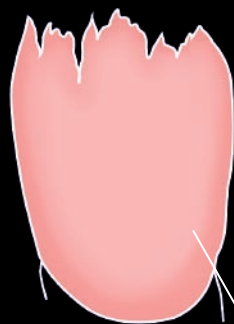

デンティン

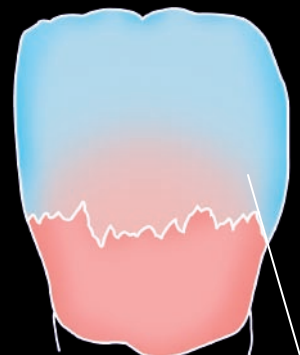


エナメル



T-Natural

三層築盛

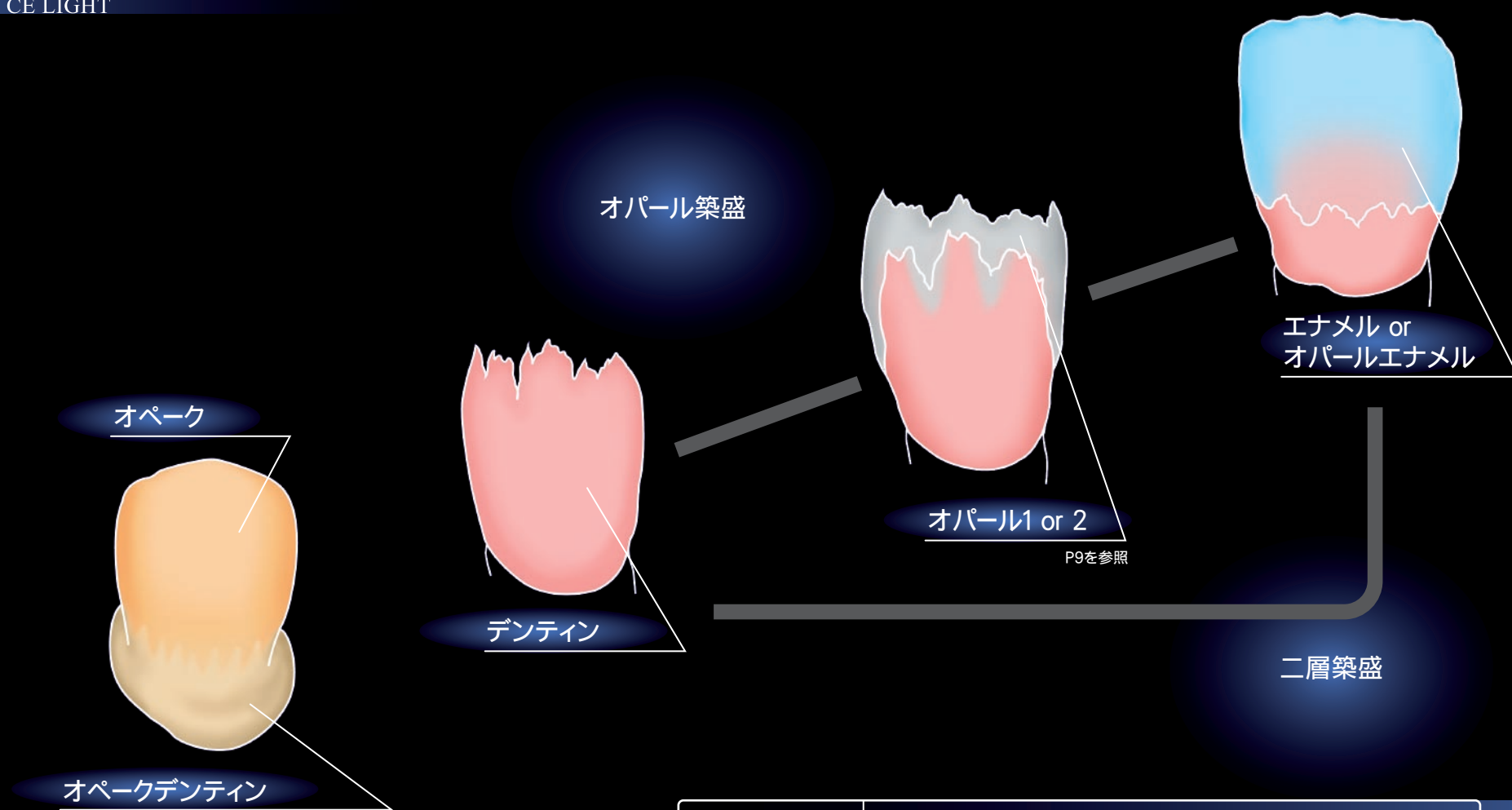


二層築盛	・ゼオセライトは二層築盛においても十分な色調の再現が可能です
------	--------------------------------


二層築盛・オパール築盛




メタル

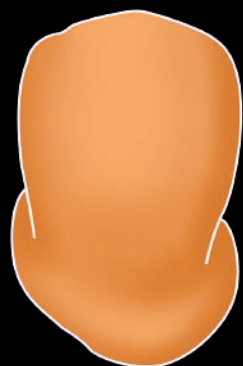

スーパーオパーク

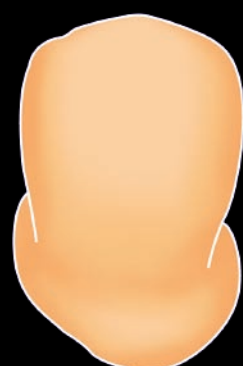


オパーク

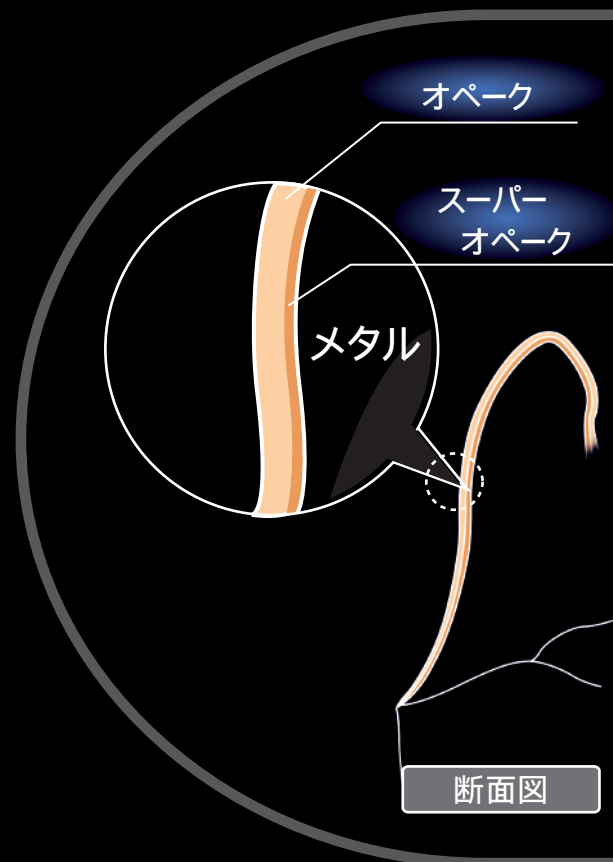

Super Opaque	・接着効果の向上とメタルの酸化膜の違いによる色調補正を目的としたオパーク
Opaque	・シェードカラーオパーク

Super Opaque・Opaque


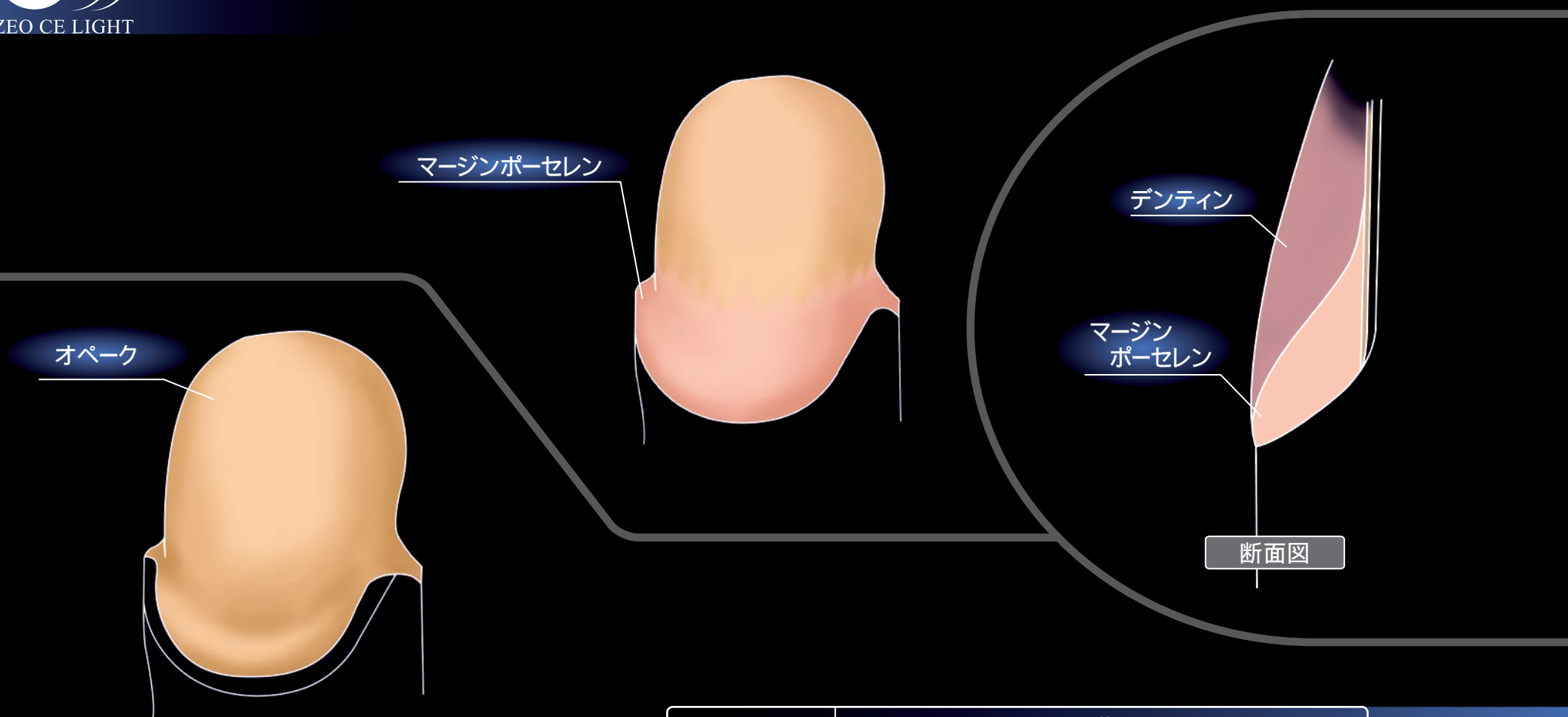


Margin Porcelain


M1	・A0、A1、B0、B1、B2のシェードに使用。
M2	・A2、A3のシェードに使用。
M3	・A3.5、A4、B3、B4のシェードに使用。
M4	・C1、C2、D2のシェードに使用。
M5	・C3、C4、D3、D4のシェードに使用。

T-Salmon

- ・歯頸部の透明感あるピンク系の色調表現
- ・サービカル陶材として、単体もしくはオパークデンティンと併用して使用

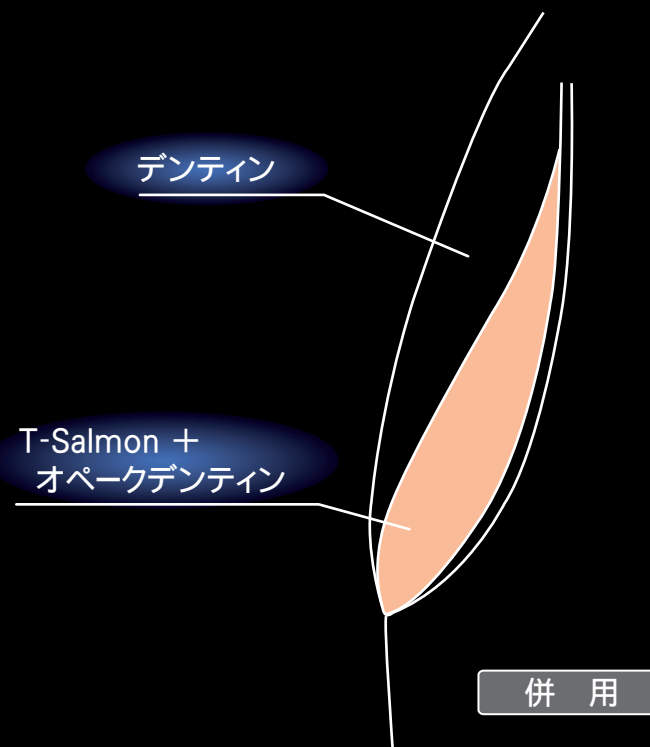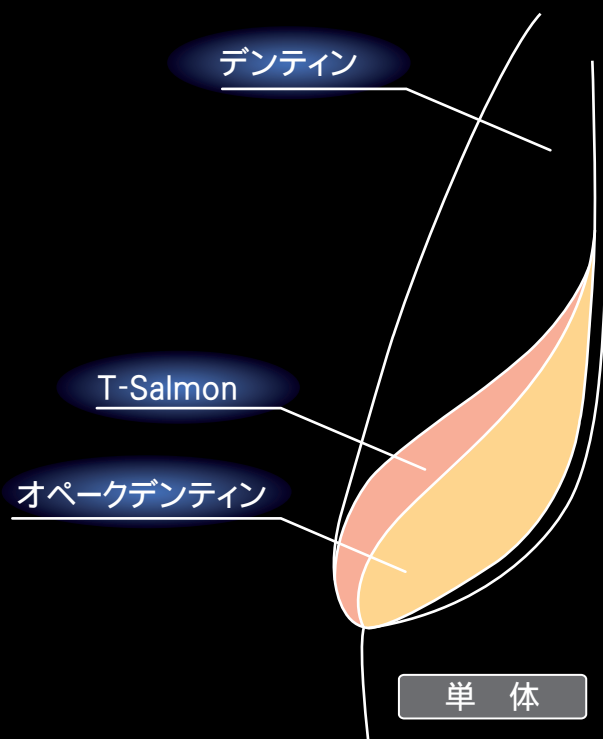

Cervical Technique

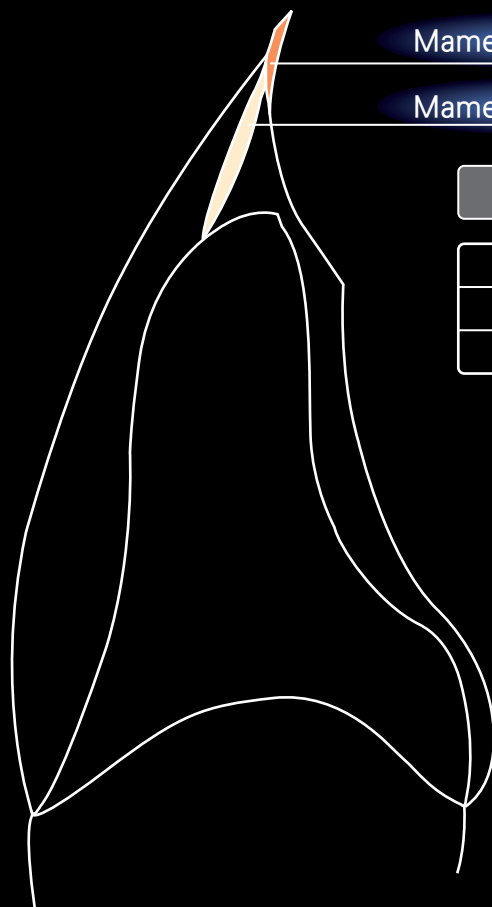

Mamelon-Orange or Mamelon-Yellow

Mamelon-Vanilla


前歯部断面図

Mamelon-Orange	・オパール効果の補足としてマメロン先端部に使用
Mamelon-Yellow	・マメロン先端部の表現等を使用
Mamelon-Vanilla	・象牙質中心部分にある不透明層の表現に使用

Occlusal-Enamel

Occlusal-Orange


Occlusal-Brown

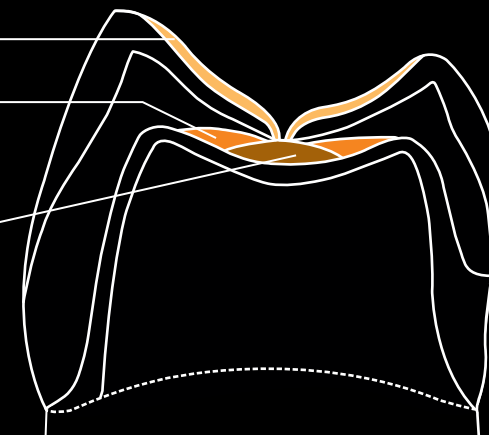

臼歯部断面図

Occlusal-Brown	・咬合面の下地として中心窩に使用
Occlusal-Orange	・咬合面全体の下地として使用
Occlusal-Enamel	・臼歯特有のオレンジ系のエナメル表現 ・咬合面全体に使用

Internal Accent

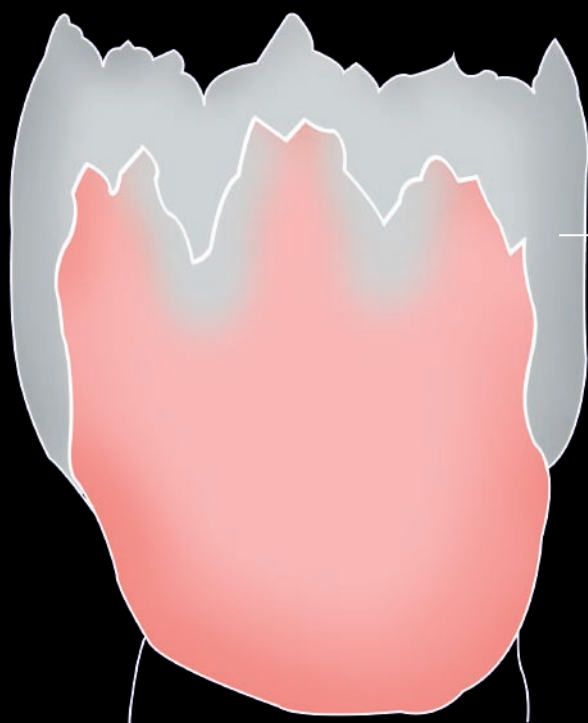


Opal 1

- ・オパール効果のある透明陶材
- ・天然歯にみられる透明層の再現として、マメロンの谷間、隣接部に使用

Opal 2

- ・Opal 1よりも、やや不透明なオパール陶材
- ・使用法はOpal 1と同様

Opal Accent

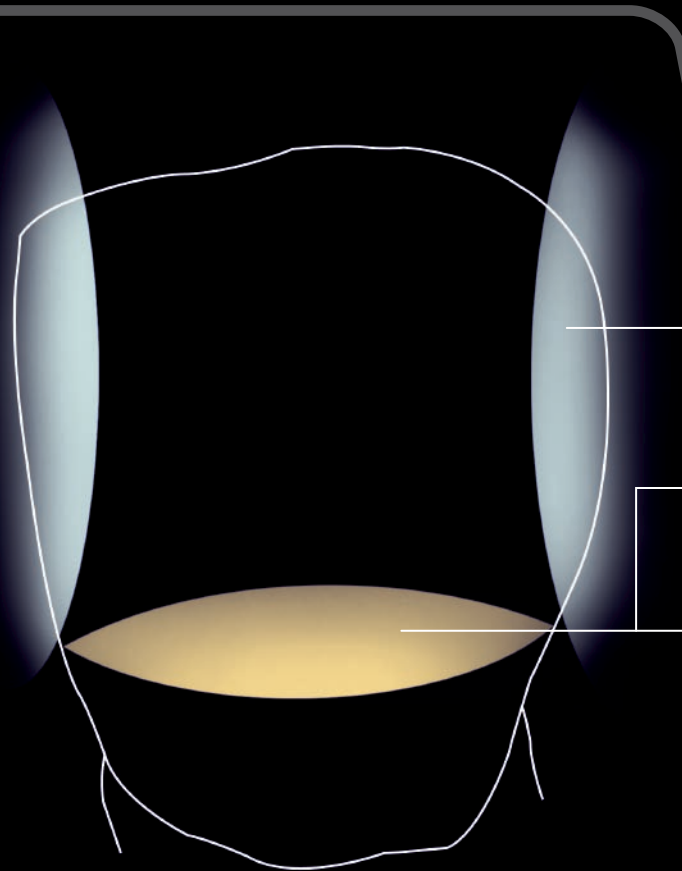

Snow White

- ・透明感のあるホワイト陶材
- ・明るいエナメル質の表現に、単体或いはエナメル陶材と混ぜて使用

White

- ・Snow Whiteよりも、更にホワイトティッシュな陶材
- ・白帯などの表現に使用

Milky

- ・milky色陶材
- ・白濁などの表現に使用

White Accent

Opal Amber

・オレンジ系の透明陶材
・前歯部のオレンジ系透明色の表現として使用

T-Buffer


・オレンジ系の透明陶材
・前歯部、臼歯のオレンジ系透明色の表現及び透明象牙質として使用

T-Amber


・T-Bufferよりも、鮮やかなオレンジ系透明陶材
・使用法はT-Bufferと同様

Yellow Ocher

・黄系のエナメル質等を表現するために使用
※シェードに該当するエナメル陶材と混合して使用

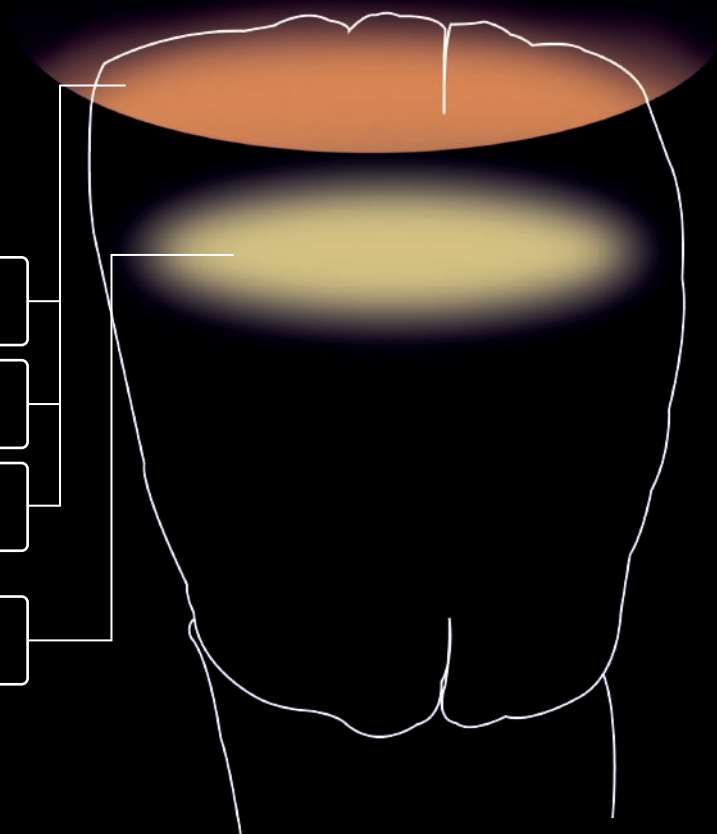

Orange Accent

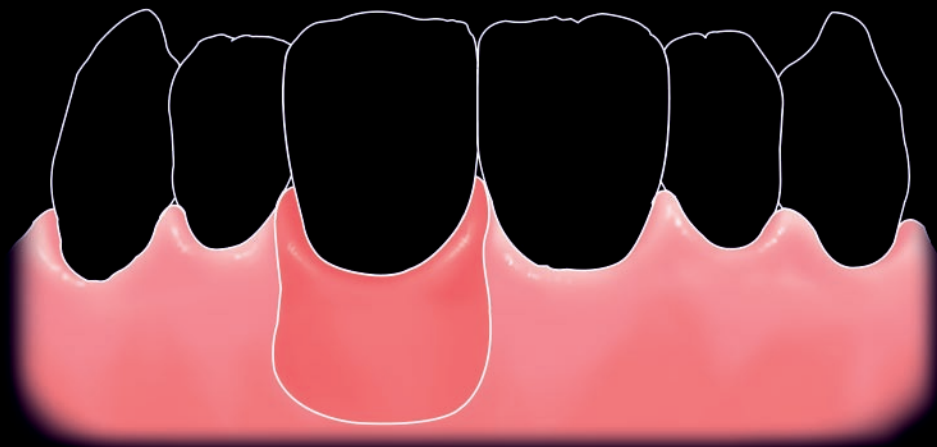

ガム	歯肉用陶材 (インプラント上部構造の歯肉色表現)
GUM-1	明るい歯肉色
GUM-2	標準的な歯肉色
GUM-3	濃い歯肉色


GUM-1

GUM-2


GUM-3

単体もしくは併用使用

GUM

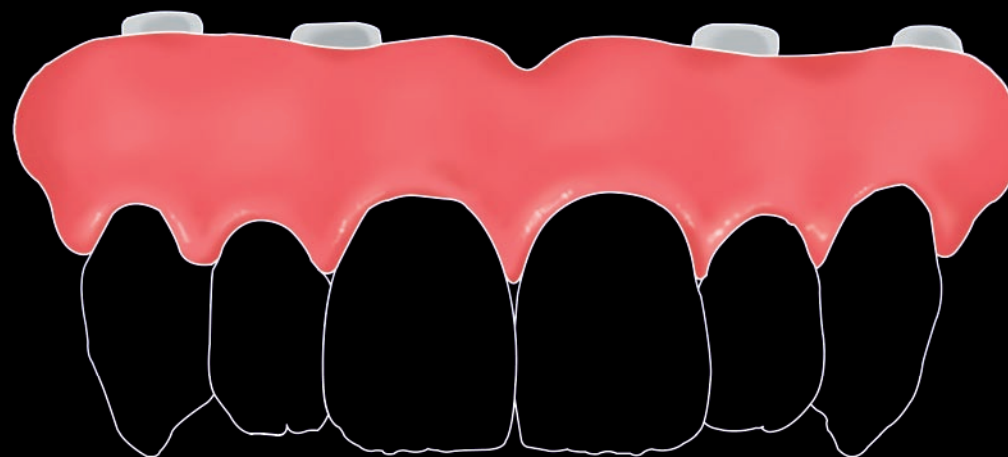

インプラント上部構造

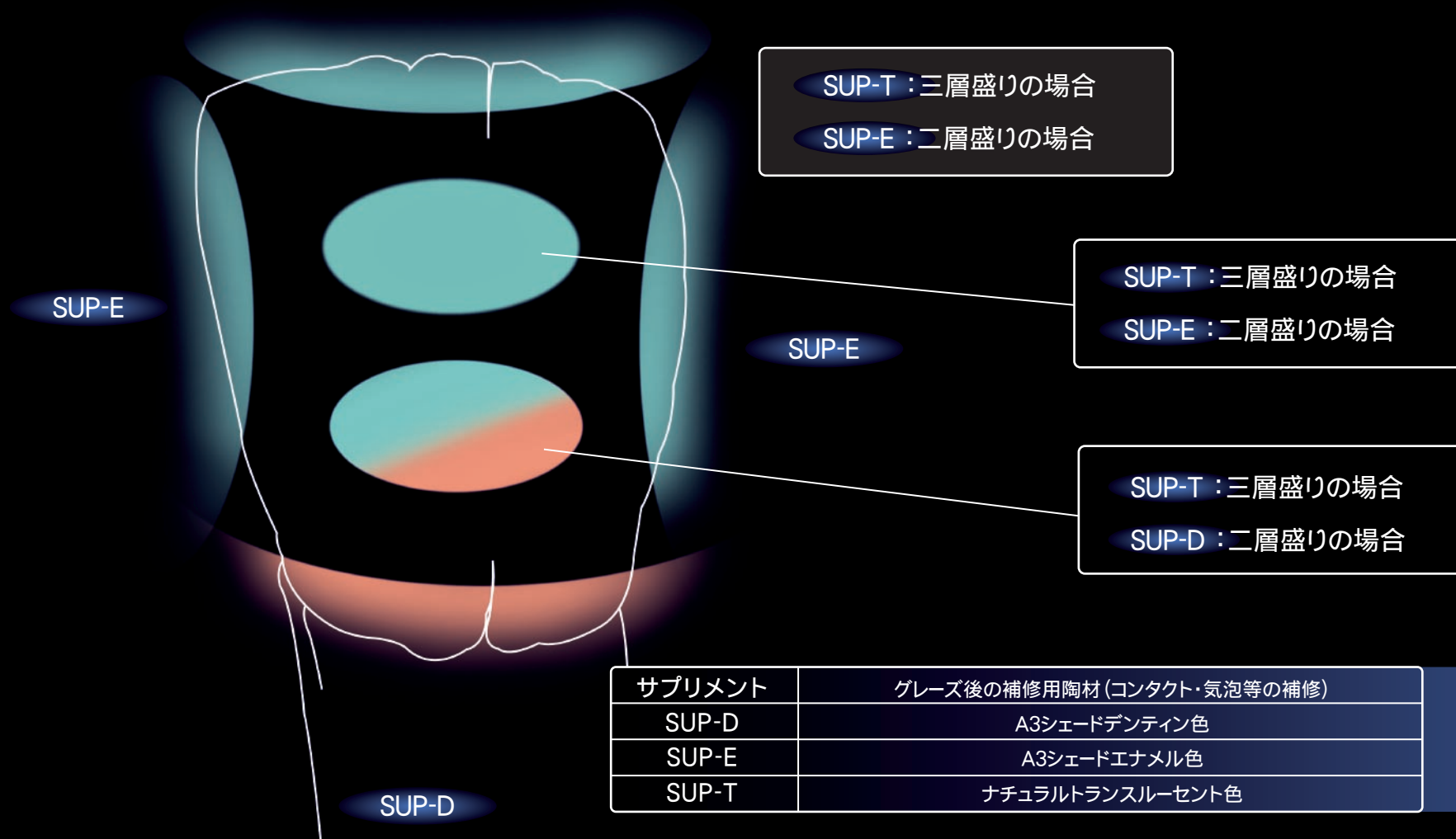

Supplement

アクセント陶材の使用方法

アクセント陶材	使用方法
	デンティン、エナメル系エフェクト陶材
Opal 1	・オパール効果のある透明陶材 ・マメロンの谷間、隣接部に使用
Opal 2	・Opal 1よりも、やや不透明なオパール陶材 ・使用法はOpal 1と同様
Snow White	・透明感のあるホワイト陶材 ・明るいエナメル質の表現に、単体或いはエナメル陶材と混ぜて使用
White	・Snow Whiteよりも、更にホワイティッシュな陶材 ・白帯などの表現に使用
Vanilla	・ややオレンジ味のあるホワイト系陶材 ・クラックラインや臼歯の咬合面隆線に使用
Milky	・ミルキー色陶材 ・白濁などの表現に使用
Yellow Ocher	・黄系のエナメル質等を表現するために使用 ※シェードに該当するエナメル陶材と混合して使用。
Mamelon-Orange	・オパール効果の補足としてマメロン先端部に使用
Mamelon-Yellow	・マメロン先端部の表現等に使用
Mamelon-Vanilla	・象牙質中心部分にある不透明層の表現に使用
Occlusal-Brown	・咬合面の下地として中心窩に使用
Occlusal-Orange	・咬合面全体の下地として使用
Occlusal-Enamel	・臼歯特有のオレンジ系のエナメル表現 ・咬合面内斜面にうすく使用

アクセント陶材	使用方法
	デンティン、エナメル系エフェクト陶材
T-Glass	・ゼオセライトの中で最も透明な陶材
T-Clear	・T-Naturalよりも、やや透明な陶材
T-Opacity	・T-Naturalよりも、やや不透明な陶材 ・トランスルーセントの中では最も不透明な陶材
T-Buffer	・オレンジ系の透明陶材 ・前歯部、臼歯部のオレンジ系透明色の表現
T-Amber	・T-Bufferよりも、鮮やかなオレンジ系透明陶材 ・使用法はT-Bufferと同様
T-Salmon	・歯頸部の透明感あるピンク系の色調表現 ・サービカル陶材として、 単体もしくはオパークデンティンと併用して使用
T-Gray	・Gray系の透明陶材 ・影付けの表現に使用
T-Violet	・Violet系の透明陶材 ・テトラサイクリンや影付けの表現に使用
T-Blue	・Blue系の透明陶材 ・青みの強い透明部分、主に切縁部分に使用
T-Baby Pink	・淡いピンク系の透明陶材 ・淡いピンク系の表現に使用
T-Pink	・ピンク系の透明陶材 ・ピンク系の表現に使用

特殊陶材・ステインの使用方法

特殊陶材	
サプリメント	グレース後の補修用陶材(コンタクト・気泡等の修正)
SUP-D	A3シェードデンティン色
SUP-E	A3シェードエナメル色
SUP-T	ナチュラルトランスルーセント色

特殊陶材	
ガム	歯肉用陶材(インプラント上部構造の歯肉色表現)
GUM-1	明るい歯肉色
GUM-2	標準的な歯肉色
GUM-3	濃い歯肉色

特殊陶材	
ステイン	内部・外部共に使用可能なステイン陶材
Glaze	グレージング用
White	ホワイト色
Milky	ミルキー色
Light Orange	明るいオレンジ色
Orange	オレンジ色
Brown	ブラウン色
Dark Brown	濃いブラウン色
Gray	グレイ色
Violet	バイオレット色
Blue	ブルー色
Pink	ピンク色
Yellow	イエロー色
Black	ブラック色
Indigo	インディゴ色(藍色)
Dark Pink	濃いピンク色
Amber	アンバー色(こはく色)
Khaki	カーキ色(暗い赤みの黄色)
Buff	バフ色(淡黄褐色)

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

本社：〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・高知・生体科学安全研究室
<http://www.yamakin-gold.co.jp>

● 製品に関するお問い合わせはこちら

テクニカルサポート  **0120-39-4929** (9:00~17:00)

サンキュー ヨ ク ッ ク

営本20110513
20170707W