


歯科材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

## KZR-CAD ワックスディスク

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状】

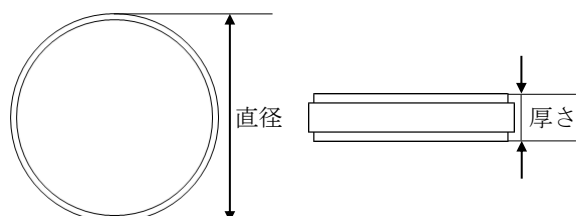

単位 [mm]

直径	厚さ
98.5	14、16、20

#### 【成分】

固形パラフィンとポリマーの混合物

#### 【原理】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、歯科鑄造物のろう型に用いる。

#### 【仕様】

焼却残さ 0.1 %以下

### 【使用目的又は効果】

本製品は、ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスである。

### 【使用方法等】

#### 【本材を使用する機械】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

#### 【使用方法】

CAD/CAM加工機等を用いて加工を行い、必要に応じて形態・マージン等の調整を行う。その後、通法に従い鑄造する。

### 【使用上の注意】

- ・本製品を切削・研磨する際は、粉塵による人体への影響を避けるため吸塵装置、保護メガネ、マスク等を使用し、粉塵を吸い込まないこと。
- ・本製品は15℃～35℃の範囲内で使用すること。
- ・連続加工等で加工機の庫内温度が上昇する場合、集塵機等を利用し庫内温度を調整して使用すること。
- ・本製品は可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- ・過度の過熱や、加熱したまま放置しないこと。
- ・クリストバライト系埋没材など急速加熱型埋没材を使用する場合は、各埋没材の使用上の注意を守り使用すること。
- ・本製品は再融解して使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・本製品は、高温・多湿・直射日光を避け、換気のよい場所で保管すること。
- ・本製品は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本製品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：YAMAKIN 株式会社

住所：〒781-5451

高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

テクニカルサポート：☎ 0120-39-4929

ホームページアドレス：<https://www.yamakin-gold.co.jp>

製造元：デジタルプロセス株式会社