

器 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN 35761000


## PRE キュアマスター

### 【禁忌・禁止】

- ①本製品は歯科技工用光重合器です。他の用途には使用しないこと。
- ②機器の操作は習熟したものの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、機器を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。
- ⑤次の行為は危険ですのでしないこと。
  - ・機器の改造
  - ・不具合、故障状態での使用
  - ・未整備状態での使用  
(未整備状態とは、指示されている定期点検や日常の点検をしていない状態をいう)
- ⑥点灯中のLEDランプを直視しないでください。視力障害を起す可能性があります。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 装置外観図

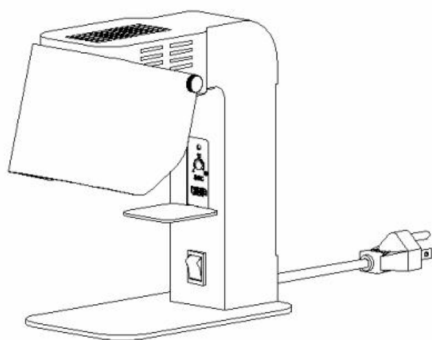

### 【使用目的又は効果】

歯科技工室で高分子材料を重合するために用いる装置をいう。本製品は光(LED)を用いて重合を行う。

### 【使用方法等】

- 1) 取り付け、設置  
付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりした机に設置すること。
- 2) 操作方法または、使用方法  
本製品の詳細な操作方法および、使用方法是付属の取扱説明書をご参照ください。

### 【使用上の注意】

使用前に取扱説明書の「安全上の留意項目」をお読みください。

- 1) 熟練したものの以外は本製品を使用しないこと。
- 2) 機器を使用中は次の事項に注意すること。
  - ・機器から異臭、異音が出るときは速やかに電源プラグをコンセントから抜き、弊社にご連絡ください。
- 3) 本製品は技工操作において光重合型レジン材料をあらかじめ部分的に硬化(固定)させるための仮重合器です。部分的な予備重合を目的としておりますので、材料各層の本重合には使用しないでください。本重合は「LEDキュアマスター」などの光重合器で、材料メーカーが指定する時間の重合を行ってください。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び付属品は使用前に点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 販売業者  
YAMAKIN 株式会社  
TEL. 0120-39-4929
- 1) 製造販売業者  
デンケン・ハイデンタル株式会社  
TEL. 075-672-2118
- \* 2) 製造業者  
デンケン・ハイデンタル株式会社