

AIR BARRIER

for C & B Resin

レジン エアバリアー材

ご使用に際しては、この取説明書の注意事項をよくお読みください。

本製品は、適度な粘性で塗布性が良く、レジン表面に薄く塗布することができるレジン エアバリアー材です。光重合レジンと重合する際にレジンエアバリアー材を塗布することで、レジン表面に空気を通さない皮膜を作り、空気中の酸素によるレジンの未重合層を大幅に低減させることができます。

【成分】 主成分：ポリビニルアルコール、エタノール、水

【用途】 光重合レジンの重合時に生じる表面の未重合層の低減。

【包装】 内容量：7ml

【使用法】

光重合レジンと最終重合する際に、筆でレジン表面に薄く塗布し、約60秒間乾燥させます。重合後は、カーボランダムポイントで削るもしくは水洗いし、取り除きます。本製品は厚く塗布すると乾燥に時間がかかりますので、出来るだけ薄く塗布してください。

【注意事項】

- ①本製品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ②本製品は使用後、速やかにキャップを閉めること。キャップを外したまま放置すると揮発成分が蒸発し、粘性の上昇、硬化を起こすことがあります。
- ③低温で長期間保管すると、粘性が高くなる場合があります。（キャップを閉めた状態で、お湯の中で5分程度温めると元の粘性に戻ります。）
- ④本製品の塗布で使用した筆は、必ず水で洗浄して下さい。アルコールで洗浄すると硬化します。
- ⑤本製品は可燃性であるため、火気の近くで使用したり、置いたりしないこと。
- ⑥本製品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた時は使用を中止し、医師の診療を受けること。
- ⑦本製品には直接素手で触れないこと。又、皮膚に付いたり目に入ったりしないよう、注意すること。皮膚に付着した場合はすぐに大量の流水で洗浄すること。万が一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・本製品は、直射日光を避けて、室温で保管すること。
- ・本製品は、同一保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本製品の使用場所及び保管場所には、消火装置を備えること。

火気厳禁

製造販売元

YAMAKIN株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク

テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929

<http://www.yamakin-gold.co.jp>