

# SEPARATOR

for C & B Resin

レジン セパレーター

ご使用に際しては、この取説明書の注意事項をよくお読みください。

本製品は、レジン分離性が良く、適合にシビアな技工作業にも対応するレジンセパレーターです。レジンセパレーターを支台歯模型に塗布することで、スムーズにレジンを分離させることができます。

**【成分】** 主成分：脂肪酸塩、エタノール、グリセリン

**【用途】** 石こう模型と光重合レジンの離型。

**【包装】** 内容量：5ml

## 【使用法】

模型のマージン部及び窩洞内面等に塗り残しがないように均一に塗布し、乾燥させます。乾燥後、光重合レジンを築盛、重合させます。窩洞内面にアンダーカットがある場合は、事前にワックス等でブロックアウトして下さい。

## 【注意事項】

- ①本製品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ②本製品は使用后、速やかにキャップを閉めること。キャップを外したまま放置すると揮発成分が蒸発し、粘性の上昇、硬化を起こすことがあります。
- ③本製品の塗布で筆が汚れた場合は、エタノール等で洗浄して下さい。
- ④本製品は、保管中に一部の成分が析出する場合があります。性能には全く問題ありませんので、数回振り混ぜ、溶かしてからご使用ください。
- ⑤本製品は可燃性であるため、火気の近くで使用したり、置いたりしないこと。
- ⑥本製品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた時は使用を中止し、医師の診療を受けること。
- ⑦本製品には直接素手で触れないこと。又、皮膚に付いたり目に入ったりしないよう、注意すること。皮膚に付着した場合はすぐにアルコール綿などで拭き取り、大量の流水で洗浄すること。万が一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・本製品は、直射日光を避けて、室温(4～25℃)で保管すること。
- ・本製品は、同一保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本製品の使用場所及び保管場所には消火装置を備えること。

## 火気厳禁

製造販売元

**YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク

テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929

<http://www.yamakin-gold.co.jp>