

# SPACER

for C & B Resin

レジン スペース

ご使用に際しては、この取説明書の注意事項をよくお読みください。

本製品は、天然ゴム系スペース特有のいやな臭いが少なく、適切な厚みで適合にシビアな技工作業にも対応するレジンスペースです。

レジンスペースを支台歯模型に塗布することで被膜を形成し、セメントの厚みを確保するとともにレジンの重合収縮による固着を防ぐことができます。

**【成分】** 主成分：天然ゴムラテックス

**【用途】** 光重合レジンジャケット冠のセメント厚みの確保と重合収縮による固着緩和。

**【包装】** 内容量：5ml

## 【使用法】

クラウンの脱形を容易にするため、マージン部を除く築盛部に均一に塗布した後、自然乾燥あるいはマイルドなエアード乾燥させます。(本製品の乾燥後、マージン部にセパレーターを塗布して下さい。)スペースの厚みは約20~50 $\mu$ m程度です。

## 【注意事項】

- ①本製品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ②本製品は使用後、速やかにキャップを閉めること。キャップを外したまま放置すると揮発成分が蒸発し、粘性の上昇、硬化を起こすことがあります。
- ③本製品に含まれる天然ゴム成分の接触により、かゆみ、発疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー症状をまれに引き起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- ④本製品との接触による過敏症状を防ぐため、プラスチックの手袋、ゴム手袋の着用等の保護処置を執り、直接素手で触れないこと。皮膚に付着した場合はすぐにアルコール綿などで拭き取り、大量の流水で洗浄すること。万が一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・本製品は、直射日光を避けて、室温(4~25℃)で保管すること。

製造販売元

**YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク

テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929

<http://www.yamakin-gold.co.jp>