

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (31776000)
フレキシブルリトラクター

【禁忌・禁止】

シリコン外側皮膜の剥離、脱落、劣化が無いこと。表面が滑らかにコーティングされ、口腔内を傷つける恐れが無いこと。どれか1つでも認められた場合は、本製品の使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状および構造〕



下顎用



上顎用

〔原理〕

本製品の形状を患者の口腔内に合わせて変形させ口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用目的又は効果】

名称	寸法
下顎用	縦 225mm 横 32mm 厚み 2.4mm
上顎用	縦 170mm 横 20mm 厚み 2.4mm

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

- 使用前に必ず洗浄、消毒、滅菌を行う。
- 使用部位に適したプレートを選択し、手で下記の推奨箇所を折り曲げる。

下顎用
本製品を折り曲げて使用することにより口腔内唇側、舌側の柔らかい組織部分両方を一つの動作で弧を描く様に同時に圧排することができる。(図1参照)
図2は折り曲げる部分を矢印で表している。舌側部分と前庭部分を広げれば広げるだけ視野を広げる事が出来る。本製品の唇部分と頬のプロテクション部分を完全に口腔内の中に入れてセットする。口腔内写真を撮影する場合は、本製品をセットしたまま下方向に回転させて歯鏡を差し込むスペースをつくる。咬合部分の撮影には水平に歯鏡を使用する。(図3参照)

上顎用
2枚組の頬用のリトラクターで、主に上顎臼歯部分のかみ合わせの撮影の際に前庭部分のリトラクターとして使用する。好みのリトラクションの形状になるようリトラクター部分をハンドル部分に近づけたり、遠ざけたり自在に折り曲げることができる。図4の矢印はあらゆる使用用途の為に折り曲げられる箇所を示している。
- 使用の際に研磨機器などが本製品に当たらないよう、注意すること。
- プレートを柔らかいスポンジで洗浄する。この際、ブラシや金属ブラシは使用しないこと。135℃の湿性温熱のオートクレーブ滅菌を15分間行う。210℃以上での滅菌やドライ滅菌はしないこと。
- 本製品はアルコール、フェノール、グルタルアルデヒドやその混合液、その他の水銀を含まない消毒液を使用出来る。



図1



図2

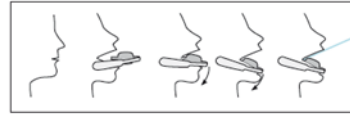


図3

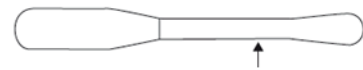


図4

【使用上の注意】

- 使用注意
 - 異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
 - 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はしないこと。
 - 使用後は柔らかいスポンジで洗浄したのち、135℃のオートクレーブ滅菌を15分間行うこと。210℃以上での滅菌及びドライ滅菌は不可。
 - タワシや研磨剤は製品表面を傷つける恐れがあるため、使用しないこと。

2. 重要な基本注意

- 本品が使用中に破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。取扱いには十分に注意し、破損片を必ず体内から除去すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 本製品は室温(4℃~25℃)で保管すること。
- 日光を避け、乾燥した暗い場所で保管すること。
- 本製品を直射日光に長時間さらさないこと。
- 本品は、歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 樹脂が変形、変色する恐れがあるため直火や火のそばに放置しない。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項：

シリコン外側皮膜の剥離、脱落、劣化が無いこと。表面が滑らかにコーティングされ、口腔内を傷つける恐れが無いこと。どれか1つでも認められた場合は、本製品の使用を中止すること。

〔ラインアップ〕

〔単品包装〕

下顎用：1枚入り

上顎用：2枚入り

〔セット包装〕

下顎用：1枚入り

上顎用：2枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：YAMAKIN 株式会社

住所：〒781-5451

高知県香南市香我美町上分字大谷 1090-3

テクニカルサポート：☎ 0120-39-4929

製造元：スマイルライン エスエー

(Smile Line SA)

国名：スイス