

ワイピーペースト YP-PASTE

〔ろう付け用溶剤〕（Lタイプ）

本品は、金合金、金銀パラジウム合金、銀合金や、ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金など幅広いろう付け溶剤として使用でき、“ぬれ現象”を促進させ、深い浸透力を持つペースト状の特殊溶剤です。

- 特 長
- 1) 活性温度範囲（約 400～約 900℃）が広く、極めて深い浸透力を持っています。
 - 2) 大部分のろう付け法、ろう材に適用できます。
 - 3) ろう付け部の不純物や酸化物を吸収除去し、ろう付け部に安定した膜をはり、酸化を防ぎながら容易にろう付けができます。
 - 4) ろう付け後の余分な残渣は、温水にて除去できます。

使用方法 ろう付け面に YP ペーストを塗布し、溶剤が溶けるまで加熱し、通法に従ってろう付けを行って下さい。

※乾燥した場合は水で適当なペースト状にして使用して下さい。

注 意 YP ペースト（Lタイプ）は一般ろう付け用としてご使用下さい。また、陶材の後ろう付けには、使用しないで下さい。

包 装 40 g

製造販売元

YAMAKIN 株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷 1090-3

YAMAKIN

ワイピーフラックス YP-FLUX

〔溶解用溶剤〕（Hタイプ・Lタイプ）

YP フラックスには、銀合金のような“低融合金”用の Lタイプと、金合金・金銀パラジウム合金のような“高融合金”用の Hタイプの 2 種類があります。合金溶解中の酸化防止、及び加熱によって生じた酸化物の除去などフラックス効果を十分に発揮します。

特 長 Lタイプは活性温度範囲（約 480～約 870℃）、Hタイプは活性温度範囲（約 750～約 1200℃）が幅広いため容易に使用できます。

注 意 本品はフラックス効果が優れているため、あまり多量に使用しないようにお願いします。

包 装 YP フラックス Lタイプ：50g
YP フラックス Hタイプ：70g

●共通注意事項

- 1) YP フラックス（Lタイプ・Hタイプ）及び YP ペースト（Lタイプ）はフッ化物を含んでおりますので、必ず下記の事項をよく読み使用して下さい。
- 2) 本品を使用する場合は、加熱による蒸気の吸入を防ぐため、局所排気装置、換気扇などを設置した場所で使用し、公的機関が認可した防塵マスクなどを着用し、目・鼻・喉などの粘膜及び気管を保護して下さい。
- 3) 目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けて下さい。
作業終了後は、速やかに洗眼、うがいなどを行い、蒸気による汚染を除いて下さい。
- 4) 説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。