

# 取扱説明書

# Z-CLEAN

Cleaning agent for Palladium alloys.

## ゼットクリーン



金銀パラジウム合金用清掃液

ご使用に際しては、この取説明書の注意事項をよくお読みください。

本製品は、鑄造した金銀パラジウム合金専用の酸化膜除去液です。  
ご使用に際しては、説明書の注意事項をよく読んでください。

### 【用途】

- ・金銀パラジウム合金で作製した鑄造体の酸化膜除去

### 【包装】

- ゼットクリーン1瓶（500ml）
- 中和剤
- 計量スプーン（1本）

### 【使用法】

- ① ゼットクリーンを容器に適量とります。
- ② 鑄造体を入れ、超音波洗浄器を使用することで、効率の良い酸化膜除去が可能です。  
早急な作業を要する場合は、ピーカーなどの容器を用いてゼットクリーンを煮沸し、鑄造体を入れることで1～2分以内に酸化膜除去が完了します。なお、室温の場合は、5～10分間液中に浸します。
- ③ 液中から鑄造体を取り出し、本品の残留を極力避ける為、水道水で超音波洗浄器を用いて洗浄を行ってください。
- ④ 本品を廃棄する場合は、付属の中和剤を使用してください。  
中和剤は計量スプーンを用い、100mlに対して3杯（1杯約5.5g）入れ、攪拌し、中和してください。

### 【注意事項】

- ① 本品が目に入った時は、すぐに流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ② 本品を使用する際は、皮膚に付着しないように十分注意して作業を行うこと。
- ③ 本品が皮膚に触れた時は、すぐに流水で洗浄し、発疹、皮膚炎等やなんらかの異常があらわれた場合は、すみやかに医師に相談すること。
- ④ 本品と他の商品を混用しないこと。
- ⑤ 本品は、取扱い説明書に記載してある用途以外に使用しないこと。
- ⑥ 本品を複数回使用し、液中に沈殿物が現れた場合、使用すると一旦除去された酸化物が置換作用により、鑄造体に再付着する可能性があるので、新しい液に取り替えること。
- ⑦ 本品を煮沸する場合は、蒸気の吸引を防ぐため、呼吸器用保護具及び保護眼鏡を着用すること。

製造販売元

**YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

(8:00-17:00) サンキュー ヨクツク

テクニカルサポート ☎ **0120-39-4929**

<http://www.yamakin-gold.co.jp>