

Z MIST

ゼットミスト

ワックスパターン用表面処理剤

ご使用に際しては、この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

本品は、ワックスパターン埋没時にワックスと埋没材のヌレ性の向上を目的とした表面処理剤です。噴霧することにより気泡の混入を防ぎ、滑沢な鑄造表面が得られます。以下に記載した使用法および用途、注意事項を良くお読みの上ご使用ください。

【用途】

- ・ワックスパターン埋没時にワックスと埋没材のヌレ性を向上させる表面処理剤

【包装】

1 瓶 (200ml)

【使用法】

埋没するワックスパターン表面に向けて20~30cm距離をおき、均一に噴霧します。液が過剰に残った場合、エア等で除去してください。鑄造体の表面荒れの原因になります。

【注意事項】

- ① 本品又は類似成分の商品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用をしないでください。
- ② 本品が目に入った時はすぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けてください。
- ③ 本品が皮膚に触れた時は、すぐに多量の流水で洗浄してください。
- ④ 本品を使用する場合は、適切な換気が行われている場所で使用してください。
- ⑤ 本品の保管場所は、火気の付近をさけた冷暗所に保管し、一つの保管場所に大量に保管をしないでください。
- ⑥ 本品と他の商品を混用しないでください。
- ⑦ 本品は取扱説明書に記載してある用途以外に使用しないでください。
- ⑧ 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

製造販売元

YAMAKIN株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク

テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929

<http://www.yamakin-gold.co.jp>