

ZSEP-n

ゼットセップ-n

ワックスパターン分離材

ご使用に際しては、この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

本製品は被膜性とべた付きを抑えサラサラ感を与えることで操作性を向上させ、適合にシビアな技作業にも対応するワックスパターン分離材です。

ゼットセップ-nを歯型材表面に塗布することで、ワックスパターンの固着を防ぎ、スムーズな分離をさせることができます。

【用途】 ワックスと各種歯型材との分離

【包装】 1瓶（50mL）

【使用法】

- ① 筆を使用し、ワックスを分離させたい歯型材表面に塗布します。
 - ② マージンショルダー部などに溜まった過剰分は除去します。
 - ③ 乾いた石膏面など、ゼットセップ-nの吸収により被膜の形成が不十分になる場合は、厚めに塗布後、放置するか、ゼットセップ-nの中に浸す方法も効果的です。このようなときも過剰分は除去します。
 - ④ ゼットセップ-n塗布後は、通法に従いワックスアップを行います。
- ※ ゼットセップ-nの吸収を防止し分離効果を高めるために、石膏表面硬化材などで歯型材表面を処理することをお勧めします。
- ※ 別容器に小分けされた場合、蒸発が進行し被膜が厚くなることが予測されます。使用後は必ずキャップをしめてください。（ポリ内栓は輸送時のモレを防ぐためのものです。取り外して使用してください。）
- ※ ゼットセップ-n塗布後、長時間放置することによって、分離効果が減少することがあります。長時間放置後は、再塗布してからワックスアップを行ってください。

【注意事項】

- ① 本品又は類似成分の商品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないでください。
- ② 本品が目に入った時はすぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けてください。
- ③ 本品が皮膚に触れた時は、すぐに多量の流水で洗浄してください。
- ④ 本品を使用する場合は、適切な換気が行われている場所で使用してください。
- ⑤ 本品の保管場所は、火気の付近をさけた冷暗所に保管し、一つの保管場所に大量に保管しないでください。
- ⑥ 直射日光が当たる場所や暖房器具等の付近に放置しないでください。
- ⑦ 本品と他の商品を混用しないでください。
- ⑧ 本品は取扱説明書に記載してある用途以外に使用しないでください。
- ⑨ 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。
- ⑩ 火気付近で使用しないでください。
- ⑪ 火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
- ⑫ すべて使用してから捨ててください。
- ⑬ 火の中に入れてください。

火気厳禁

製造販売元

YAMAKIN株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク

テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929

<https://www.yamakin-gold.co.jp>