

歯科用色調遮蔽材料（オペーカー）



f・u・n・o

ア・ウーノ オペーカー

OPAQUER

薄い塗布でもしっかり遮蔽


高い色調適合性・自然な歯冠色

1色で幅広い症例の色調に合うユニバーサルシェード型コンポジットレジン「ア・ウーノ」の技術を応用した、色調適合性の高い、自然な歯冠色のオペーカーです。

透過率を低く設計することにより、薄い塗布厚みでも変色歯や金属が露出した前装冠の金属部をしっかり遮蔽できます。



オペーカーなし

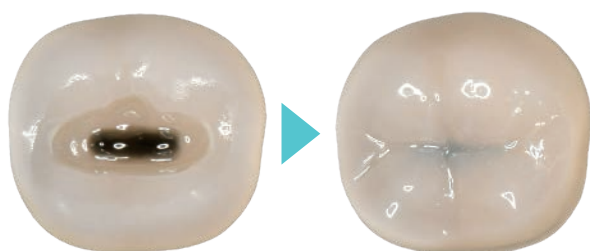

オペーカーあり




A3窩洞模型（窩底部に「ルナウィング」ステイン Blackを塗布）に「ア・ウーノ」ベーシック Stを充填。



陶材焼付鑄造冠の
口腔内リペア



形成後

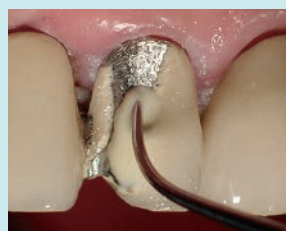



「ア・ウーノ オペーカー」塗布



治療後
（「ア・ウーノ」ベーシック充填）


遮蔽性

「ア・ウーノ オペカー」は透過率が低く設計されており、背景色を遮蔽することができます。


	ア・ウーノ オペカー	TMR-ゼットフィル10.
シェード	UD	OA3
光硬化深度 (JIS T 6514 に準拠)	0.4mm	1.0mm
透過率 (ベレット厚み: 0.4mm)	約 16% 	約 65% 

硬さ

「ア・ウーノ」で活用したヤマキンのフィラーテクノロジーの採用およびレジンの重合性の向上により、コンポジットレジンと同等の硬度を実現しています。

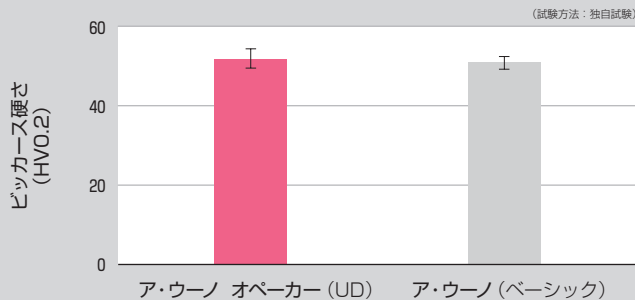


操作方法

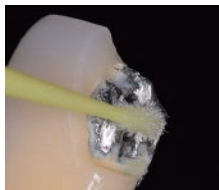


修復面を切削して新鮮面を出し、ボンディング処理(前処理含む)します*1。



「ア・ウーノ オペカー」を塗布します。
(適用部位の半分程度の面積に塗布し、インスツルメント等を用いて薄く広げ、0.4mm以下にします*2。)

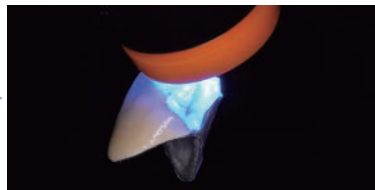

光照射します。
LED 照射器 (光量 1,000mW/cm² 以上) の場合、20 秒以上光照射します*3。

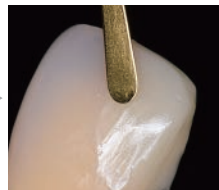

コンポジットレジン*4で修復します。

- *1 当社適用製品: 「TMR-アークアボンド 0-n」(被着面がセラミックス・コンポジットレジンの場合は「マルチプライマー リキッド」で前処理)
*2 「ア・ウーノ オペカー」の光硬化深度は 0.4mm です。厚くなりすぎると硬化不足によるリスクが生じる可能性があるためご注意ください。
*3 1 回の塗布で色調を遮蔽されていない場合は、必要に応じて照射後に追加で重ね塗りしてください。
*4 当社適用製品: 「ア・ウーノ」「TMR-ゼットフィル10.」

TMR-ゼットフィル10. 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号: 230AABZX00066000
ルナウイング 管理医療機器 歯科用硬質レジン 認証番号: 218AABZX00035000
TMR-アークアボンド 0-n 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材) 認証番号: 303AABZX00049000
マルチプライマー 管理医療機器 歯科金属用接着材料(歯科セラミックス用接着材料、歯科レジン用接着材料) 認証番号: 226AABZX00069000

ラインアップ



ア・ウーノ OPAQUER

管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料 認証番号: 306AABZX00018000

単品包装

ア・ウーノ オペカー 1.0g (0.5mL)
付属品: ニードルチップ 10本
(UD)
1,400円

小容量で
ムダなく
使える

ア・ウーノ
特設サイト



関連製品



保険適用

ア・ウーノ

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号: 304AABZX00013000

単品包装

*ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。

ユニバーサル



ア・ウーノ ユニバーサル
(ベースック/St ベースック)
各 4.0g (2.0mL) 2,900円

ローフロー



ア・ウーノ ローフロー
(ベースック/St ベースック/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

フロー



ア・ウーノ フロー
(ベースック/St ベースック/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

バック

同色3本パック
(ベースック/St ベースック)
・ユニバーサル 8,250円
・ローフロー 8,250円
・フロー 8,250円

単品

ニードルチップ 20本 600円

製品や機型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容量などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格(税抜き)です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知

生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室

<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート

(平日 9:00~17:00) サンキュー ヨク ック

製品に関するお問い合わせ

0120-39-4929

LINE公式アカウント
友だち募集中

アカウントをご登録
いただくと最新の
歯科情報、キャン
ペーンなどについ
てお届けします!



お取扱店