

CAD/CAM用ジルコニアディスク



KZR-CAD Zr

KZR-CAD ジルコニア グラデーション SHT/HT

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 認証番号：228AFBZX00044000

色調		外径 (Φ) 98.5 mm		
		厚さ (t)		
		14 mm	18 mm	22 mm
GR-SHT	A0ホワイト, A1, A2, A3	39,600円	42,900円	45,100円
GR-HT	A0ホワイト, A1, A2, A3			

焼成スケジュール (参考値)

	昇温	昇温	保持	冷却
温度 (°C)	1,000	1,450	1,450	炉内 放冷
時間 (hour)	2	4.5	2	

ジルコニア用ステイン陶材



ゼオセライト ZR

管理医療機器 歯科用陶材 認証番号：227AFBZX00042000

全24色 3.5g 2,500円

(Glaze, White, Milky, Light Orange, Orange, Brown, Dark Brown, Gray, Violet, Blue, Indigo, Pink, Dark Pink, Yellow, Khaki, Amber, Black, Buff, Fluorescent, Opal Glaze, Shade A, Shade B, Shade C, Shade D)

希釈液 ステインリキッド (10 mL) 1,000円



シェードガイド

本製品は受注生産品です。



製品名	シェード	価格
KZR-CAD Zr GR-SHT シェードガイド	GR-SHT-A0ホワイト GR-SHT-A1 GR-SHT-A2 GR-SHT-A3	13,400円
KZR-CAD Zr GR-HT シェードガイド	GR-HT-A0ホワイト GR-HT-A1 GR-HT-A2 GR-HT-A3	13,400円

院内コミュニケーションツール

「ジルコニアセラミック」を使用した治療のご案内リーフレットとポスターです。



ジルコニア治療案内ポスター (A3サイズ)



ジルコニア治療案内リーフレット

ご注文はお電話 (フリーダイヤル) かWebサイトからもお申込みいただけます。
送料含め、無料でご提供しております。テクニカルサポート
(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
☎ 0120-39-4929https://www.yamakin-gold.co.jp
ヤマキン 歯科 検索

製造販売元 YAMAKIN株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大 阪 ・ 東 京 ・ 名 古 屋 ・ 福 岡 ・ 仙 台 ・ 高 知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
https://www.yamakin-gold.co.jp製品に関するお問い合わせ (9:00~17:00)
テクニカルサポート サンキュー ヨクツク
☎ 0120-39-4929

お取扱店

歯科切削加工用セラミックス

KZR-CAD ジルコニア グラデーション

GR-SHT-A0ホワイト / GR-HT-A0ホワイト



Aurora “WHITE” Gradation

オーロラ ホワイト グラデーション

KZR-CAD Zr



GR-SHT-A0ホワイト

透明感のある白さ



GR-HT-A0ホワイト

強度を兼ね備えた白さ



※SHTは3歯連結までの症例にお使いください

均一な強度

単一組成積層型のため、切端部から歯頸部まで均一な強度であり、ひずみなどなく安心してお使いいただけます。


材料特性(参考値)

	SHT	HT
0.5 mm厚ペレットでの透過率の比較		
透過率(%)※1	51	43
曲げ強さ(MPa)※2	770	1,200
破壊靱性(MPa・m ^{1/2})※3	2.6	4.3

※1 弊社試験による(厚さ1mmペレット) ※2 3点曲げ試験 JIS T 6526 : 2018
※3 SEPB法 JIS R 1607 : 2015

良好な切削加工性

切削加工に最適な硬さを示すよう仮焼結しています。切削中のチッピングを抑制し、安定かつ精度よく加工することができます。

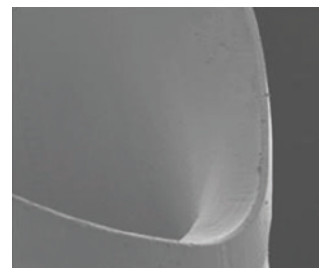

KZR-CAD ジルコニア

切削加工性が良好




試作品

うろこ状のチッピングや
切削痕が発生

オーロラグラデーション


コントラスト比が各層均一になるよう制御しており、色調変化がなめらかで高い審美性を実現しております。

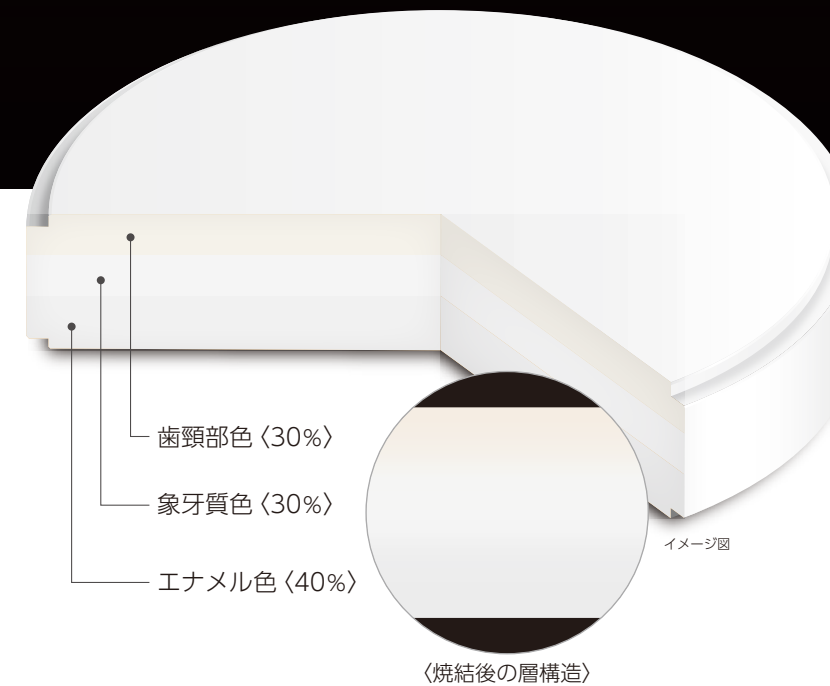

ステイニングによるキャラクタライズ

ゼオセライトZRステインを用いれば、テクニシャンの感性を自由自在に表現できます。

・使用方法ムービー

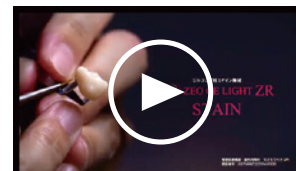

・インストラクション
ガイド

