

歯科技工用リテンションビーズ ゼットビーズ Z BEADS



歯科技工士の優れたテクニックを発揮するためには、
その裏付けとなる材料が不可欠です。

Z BEADS セット品・単品内容

【セット包装】	【単品包装】
ゼットビーズセット 4,200円	粉材 (130μm) : 20g 2,800円
・粉材 (130μm) : 20g 1本	粉材 (180μm) : 20g 2,800円
・液材 : 10mL (筆つきキャップ) 1本	液材 : 10mL (筆つきキャップ) 1,800円

一般医療機器 届出番号: 39B2X10002000004


視認性の向上

粉材 (130μm) を「黄緑」、粉材 (180μm) を「黄」に着色することで、視認性が向上しました。

硬質レジンをしっかりホールド

接着剤の被膜が約2ミクロンとなるよう薄く設計、ビーズのアンダーカットを大きく確保します。


薄い接着剤の被膜の効果 (模式図)

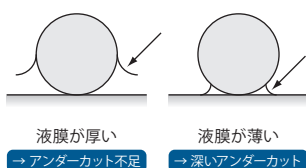

大きさの異なる2種類のビーズを用意

大きさの異なる2種類のビーズ (130μm, 180μm) を用意しましたので、築盛スペースの厚みに応じて使い分けることができます。

きれいなアンダーカットのゼットビーズ

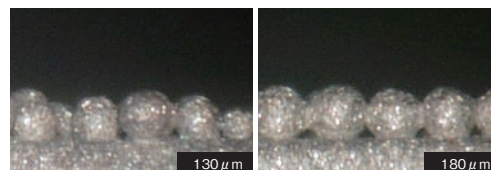

ドクターが指定する硬質レジン

Luna-Wing



健康保険適用硬質レジン ルナウィング

管理医療機器 歯冠用硬質レジン 認証番号: 218AABZX00035000

セラミックス・クラスターがもたらすイノベーション

TWiNY



ハイブリッド型硬質レジン ツイニー

管理医療機器 歯冠用硬質レジン 認証番号: 222AABZX00121000

LED採用 歯科技工用光重合器

LED CURE Master



歯科技工用重合装置 LEDキュアマスター

販売元 YAMAKIN株式会社 製造販売元 デンケン・ハイドンタル株式会社
一般医療機器 届出番号: 26B2X10018000017

歯科用パターンレジン ゼットパターン

表面性状がなめらか

クラウンの内面など鑄造体の表面性状やアバットメントとの精密な適合に適しています。

収縮率を0.38%に抑えました

精密な適合はもちろん、ろう付け時の仮着に使用すると、ひずみなく活用できます。

垂れにくく操作性に優れます

造形性が良好ですので、築盛作業に専念できます。

サクサクとした切削感

硬化物がサクサク削れ、バーにこびりつかず、軽快な作業感覚です。

新感覚のスクリーノズル

くるりと回してスムーズに開閉できる粉材容器。

Z PATTERN セット品・単品内容

【セット包装】

ゼットパターンセット	6,500 円
粉材：70g	1 本
液材：70g(73mL)	1 本
シリコンラバーカップ	2 個
スポイト	1 本
筆 No.1	1 本

【単品】

粉材：70g	3,200 円
液材（スポイト付き）：70g(73mL)	3,300 円
シリコンラバーカップ	750 円
筆 No.1（5本）	6,000 円

一般医療機器 届出番号：39B2X10002000003



Z PATTERN

Self-Curing Acrylic Resin for Pattern

ワックスパターン用表面処理剤

ゼットミスト

ワックスパターン用表面処理剤



ワックスパターンの埋没時に、ワックスと埋没材のヌレ性の向上を目的とした表面処理剤です。
噴霧することにより気泡の混入を防ぎ、滑沢な鑄造表面が得られます。
また、大容量200mLでとても経済的です。

主な用途：表面処理剤
ワックスパターン埋没時にワックスと埋没材のヌレ性を向上する。
NET.200mL

ワックスパターン分離材

ゼットセップ-n

シビアな技工作業にも対応する分離材



本製品は被膜性とべた付きを抑えサラサラ感を与えることで操作性を向上させ、適合にシビアな技工作業にも対応するワックスパターン分離材です。
ゼットセップを歯型材表面に塗布することで、ワックスパターンの固着を防ぎ、スムーズな分離をさせることができます。

主な用途：ワックスと各種歯型材との分離
NET.50mL
※筆はルナウィング筆、または筆No.1を推奨します。

製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容量などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格（税抜き）です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大 阪 ・ 東 京 ・ 名 古 屋 ・ 福 岡 ・ 仙 台 ・ 高 知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

製品に関するお問い合わせ（9:00～17:00）
テクニカルサポート サンキュー ヨクツク
☎ 0120-39-4929

お取扱店